
## Features



洗浄槽内が見えるガラスドア採用

二重ガラス断熱構造のため、熱水消毒の ときでも表面は熱くなりません。

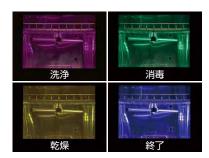

#### 洗浄の進行状況を色で表現

洗浄槽内にはLEDライトを搭載しており、 洗浄・すすぎ・消毒・仕上・乾燥・終了の状 況を全5色で表現します。



#### 93℃消毒コースを搭載

多彩な洗浄・消毒コースを搭載。

80℃以上の熱水処理を10分維持: Ao値 600 93℃以上の熱水処理を10分維持: Ao値12000 国際規格(ISO15883)では手術器械にAo値600 以上を適用すること、手術器械に用いるウォッシャーディスインフェクターの性能にAo値3000以 上を達成できることを求めています。

#### **多彩な洗浄/消毒コースを搭載** 「すすぎ10分」から「93℃10分洗浄/消毒」まで、多彩なコースを搭載。



※乾燥・仕上剤(乾燥促進潤滑防錆剤)の工程あり/なしは選択できます。 ※供給水が常温の場合は、約15~20分ほど長くなります。

## Item Line up



各種ラック、バスケット、スタンドを用意。 詳しくは、オプションカタログをご覧ください。



専用酵素洗浄剤BSウォッシュ酵素20専用アルカリ洗浄剤BSウォッシュアルカリ20専用乾燥促進防錆潤滑剤BSコート20専用槽内洗浄剤BSクリーナー500g

器具除染用洗浄器AW-150ウォッシャー・ディスインフェクター

# Specifications

#### 主な仕

土の口泳	
販 売 名	ウォッシャー・ディスインフェクター AW-150
一般的名称	器具除染用洗浄器
機 器 の 分 類	一般医療機器(クラス I)
届 出 番 号	20B2X10010000004
電源電圧	単相AC200V±10% (50/60Hz)
消費電流	14A
外 形 寸 法	W580×D600×H840mm
槽内寸法	W500×D480×H490mm
重量	87kg (本体)
洗 净 剤	専用酵素洗浄剤※、専用アルカリ洗浄剤※、乾燥促進潤滑防錆剤
標準機能	排水冷却機能、温風乾燥機能、洗剤自動計量·投入機能
オプション	プリンター、純水すすぎ機能

※設置時に「専用酵素洗浄剤」「専用アルカリ洗浄剤」いずれかを選択します。
※仕様・カタログ等の掲載内容は製品改良のため予告無く変更する場合があります。

### 関連製品

### **MB-250** クラスBオートクレーブ

販 売 名:卓上高圧蒸気滅菌器 MB-250 一般的名称:小型包装品高圧蒸気滅菌器

機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)/特定保守管理医療機器

医療機器認証番号:第225AKBZX00091000号製造販売:チヨダエレクトリック株式会社





本社: 〒387-0018 長野県千曲市大字新田124 TEL: 026-273-1800 http://www.chiyoda-electric.co.jp 販売店







### :: Various functions



#### 手洗いのリスクを低減

手洗いによる洗浄は、刺傷、切傷などによ る感染の危険性があります。AW-150で あれば自動的に「洗浄・消毒・乾燥」ができ 従事者の感染リスクを低減します。



均一した洗浄・消毒

洗浄する作業者に関係なく、均一したレ ベルの洗浄・消毒を行うことができます。



#### 業務の効率化

一度に多くの器具を自動で「洗浄・消毒・ 乾燥」しますので、手洗い洗浄に比べて労 力を大幅に低減することができます。



#### 日本語表示のカラータッチパネル

カラータッチパネルによる表示と日本語 表示で簡単に操作できます。また、運転状 況の詳細確認も可能です。



#### 洗剤自動計量・自動投入

AW-150側面にセットされた専用洗浄剤、 乾燥促進防錆潤滑剤ボトルより、自動で 計量・投入します。ボトルの残量が少なく なると自動でお知らせします。



#### SDカードスロット

運転履歴をタッチパネルで確認。SDカー ドへ保存します。



#### 扉電磁ロック方式

扉の開錠はタッチパネルから行えます。 洗浄中にうっかり開けてしまうことを 防止します。



#### 工程表示LED

前面パネルへ工程表示LEDランプを配置。 離れた場所からも運転進捗を把握するこ とができます。



#### 清浄な温風乾燥

外気からの異物混入を防ぐため、吸気口 にはHEPAフィルターを装備。清浄な温風 で乾燥します。



#### 排水冷却機能

消毒に使用した熱水を冷却して排出する 排水冷却機能を標準搭載しているため、 耐熱配管工事が不要です。

— スムーズスライド方式 各段がスライドレールにより引き出せる ので、洗浄物のセットが簡単に行えます。

- 回転式ノズルシャワー方式

3か所に設けたシャワーノズルで

均一に万遍なく洗浄が行えます。